

嘉義縣輔具資源中心

抽痰機使用說明

一、功能：用於口腔、鼻腔及肺部等異物(痰)抽吸。

二、規格：


1. 產品尺寸：(L)375 x (W) 220 x (H) 250mm
2. 最大真空壓力：560+/-3%mmHg
3. 流量：> 40LPM/分鐘

三、使用步驟：

1. 在抽痰瓶內加入約 200C.C. 的水(圖一)，使痰液較不易流滯瓶身
(**勿加太多水，將使機器吸入水份而造成機器損壞**)，蓋緊瓶蓋。
2. 接上抽痰延長管於抽痰瓶吸入口(圖一 b 處)，
再接上吸力導管並安裝於抽痰機上(圖一 a 處)，
如圖二。
3. 將電源插頭插入電源座，使用 110V 電壓。
4. 將開關按至 ON 處即為打開電源。
5. 觀察真空錶壓力指數，以調整吸力大小到適當
位置，找到壓力調整閥旋鈕，順時鐘方向為增
加吸引力，逆時針方向為降低吸引力。
(**壓力設定-大人：100-200 mmHg**)。
6. 將抽痰管輕放入，放入深度：口鼻 15-20 公分；
氣切 12-14 公分，抽吸時間每次**不得超過 15 秒**
以上，兩次抽痰時間應間隔 1-2 分鐘。
7. 機器使用結束後，即關閉電源開關 OFF 並拔下電源插頭。



圖一

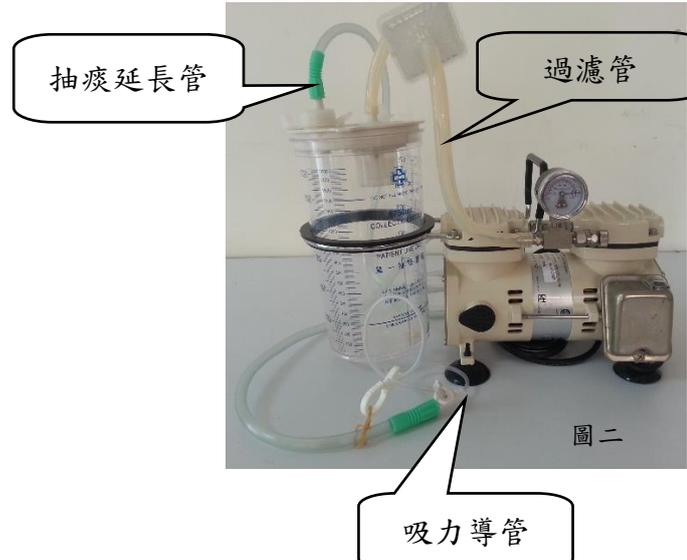

圖二

四、注意事項：

1. 每使用完一次抽痰機一定要將抽痰瓶內的液體沖洗乾淨，方便下一次使用 (絕不能讓液體超過瓶身的一半，以免造成液體回抽導致過濾棉阻塞機器故障，無法再抽痰)。
2. 抽痰瓶蓋內的止回閥，如果在清洗過程中掉落，請按原卡榫位置回扣即可。
3. 不使用機器或清潔機器時，一定要先將電源插頭從插座上拔下。
4. 請隨時注意吸入口與抽痰機之接管有無吸入水份，如已吸入水份請儘速送修，以防機器損壞。
5. 每兩、三天，請用微濕的布擦拭機身，以維護機器的清潔。
6. 不要將機器擺在接近水源、火源、桌角、小孩容易接觸到的地方。
8. 機器外部：用乾淨的布以 1：100 稀釋漂白水擦拭。
9. 收集瓶：每日至少清洗引流瓶一次，收集液容量超過 2/3 時應以肥皂水清洗，每隔三天應依下列方法擇一消毒之：
(一). 以 75%酒精浸泡 30 分鐘後沖掉。
(二). 以家用漂白水 (3%) 稀釋 10 倍後，浸泡 30 分鐘後沖掉。
10. 若是人為使用不當而造成機器損壞，請自行找廠商進行維修，或連絡本中心協尋廠商維修(須照價賠償)。